

ベッド・
ベッド
付属品



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

床ずれってなに？

寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

圧迫

① 細胞は血から栄養をもらっています。

② 血の流れが悪いと栄養がもらえません。

↓ 圧迫 ↓ 圧迫

③ とうとう細胞が死んでしまいました。

床ずれ

ずれ力

①

ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じような力がかかります。

②

床ずれ

発生しやすい部位

歩行器

まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

| | | |
|--|---|---|
| <p>Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？</p> | <p>A1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・できる 0点 ・どちらでもない 1.5点 ・できない 3点 | <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 点 |
| <p>Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>正常</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>軽度・中等度</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>高度</p> </div> </div> | <p>A2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・正常 0点 ・軽度・中等度 1.5点 ・高度 3点 | <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 点 |
| <p>Q3 むくみはありますか？</p> | <p>A3</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いいえ 0点 ・はい 3点 | <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 点 |
| <p>Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？</p> | <p>A4</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いいえ 0点 ・はい 1点 | <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 点 |

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついたら、床ずれになりやすい人です。また、点数が高い人ほど床ずれになりやすい人です。

合計

 点

販売品

情報

| OHスケールとリスクレベル | | | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 合計点数 | リスク | 床ずれ発症率(目安) | 治癒期間(目安) |
| 0点 | リスクなし・予防 | — | — |
| 1~3点 | 軽度リスク | 約25%以下 | 40日 |
| 4~6点 | 中等度リスク | 約26~65% | 57日 |
| 7~10点 | 高度リスク | 約66%以上 | 173日 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・
ベッド
付属品

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

| 合計点数 | 介護力あり | 介護力なし | 静止型 | ハイブリッド型 | 圧切替型 | ＜リスク＞ | ＜種類＞ |
|-------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 0点 | 布団、ベッドマットレス | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) | 体圧分散性能と、安楽性や安定性の バランスに優れています。 | | | 予防～軽度 | 圧切替型 静止型 ハイブリッド |
| 1～3点 | | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど | | ウレタンフォームとエアを組み合わせ たマットレスです。 | | 軽度～中度 | |
| 4～6点 | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) | | | | 中度～ リスク保有者 | |
| 7～10点 | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など | | | エアを自動的に出し入れし、圧がかかる 場所を移動させるマットレスです。 | 軽度～ リスク保有者 | |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

床ずれ対応マットレス一覧表

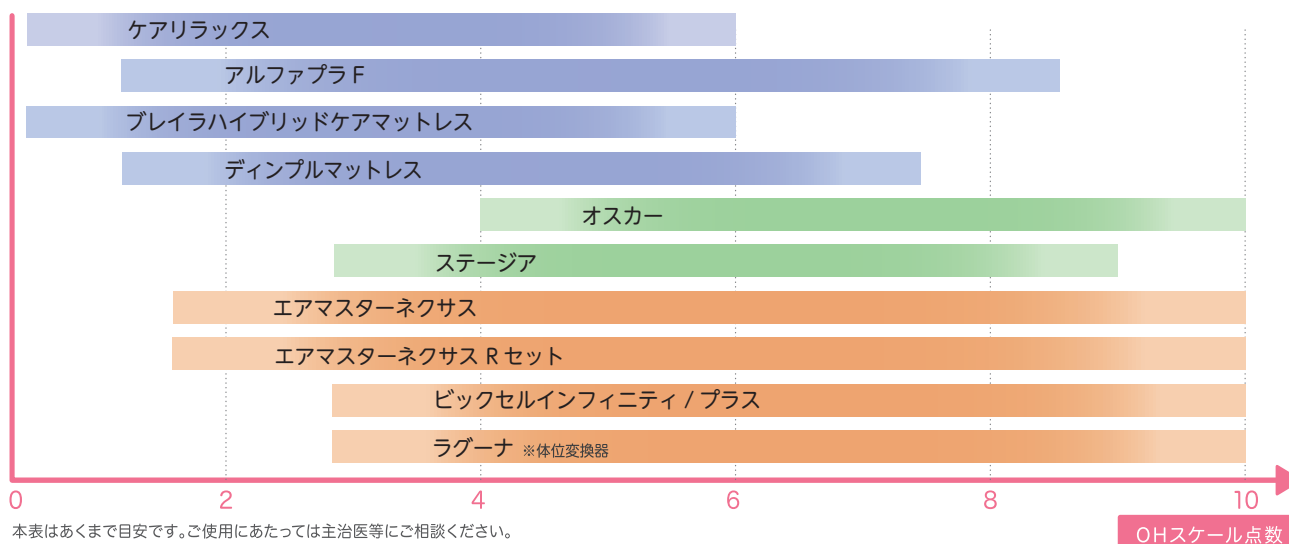

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>観察ポイント例</p> <p>動作</p> <ul style="list-style-type: none"> 背上げの頻度 床上移動の仕方 起き上がりの仕方 移乗の仕方 かかとのずれ力 | <p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○質の高い動作介助 ○用具の利用 | <p>観察ポイント例</p> <p>身体状況・体位</p> <ul style="list-style-type: none"> こらしやく 関節拘縮のレベル えんばい 円背のレベル 麻痺の箇所 側臥位の頻度 好意体位の有無 | <p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○質の高い動作介助 ○ポジショニング |
|---|--|--|--|

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

ベッド・
ベッド
付属品



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

ケアリラックス



日本ケアサプライ

グリーン
ケア 予防～軽度 静止型

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

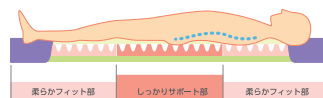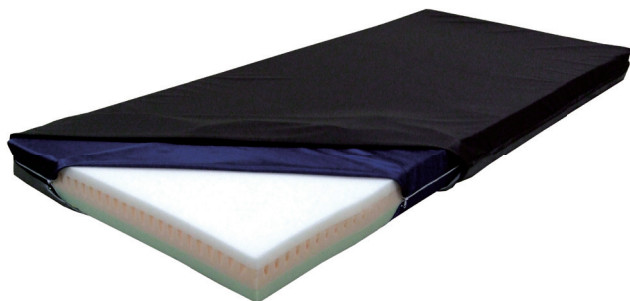

ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックスして行えます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5400-1 | 00614-000003 |

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7.6kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ショート | 13-5404-1 | 00614-000003 |

サイズ：幅 91 × 全長 181 × 厚さ 10cm 重さ：7.3kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5399-1 | 00614-000003 |

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7kg

材質/外カバー：ポリウレタンラミネート加工布 (抗菌・防水) 内カバー：ポリエステルサテン、マット：ポリウレタンフォーム

| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 | (3割) 1,500 円 | 月額レンタル料金 5,000 円 |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|

厚さ
10
cm 重さ
7~7.6
kg



歩行
補助杖

キュオラ 通気

ケープ


軽度～中度 静止型

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品



高い反発弾性により、フォームの跳ね返す力が利用者の動こうとする力をサポートします。

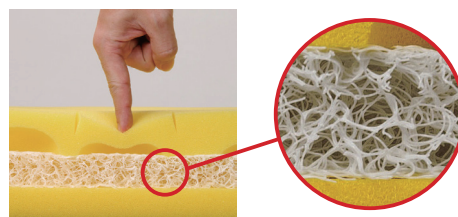

スロープ

移動用
リフト・
つり具

厚さ
10
cm 重さ
7
kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5484-1 | 00206-000077 |

サイズ：幅90×全長191×厚さ10cm

材質/マット：1層目：超選気高弾性ウレタンフォーム、2層目：プレスエア (R) (制菌)、3層目：超選気高弾性ウレタンフォーム
カバー：<上面・側面> ポリエステルドライメッシュ (吸水速乾・制菌・消臭) <下面> ナイロンオックス

| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 | (3割) 1,500 円 | 月額レンタル料金 5,000 円 |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|



介護保険
購入
対象品

ディンプルマットレス

ケープ

軽度～中度 静止型

販売品

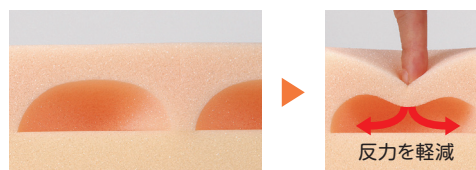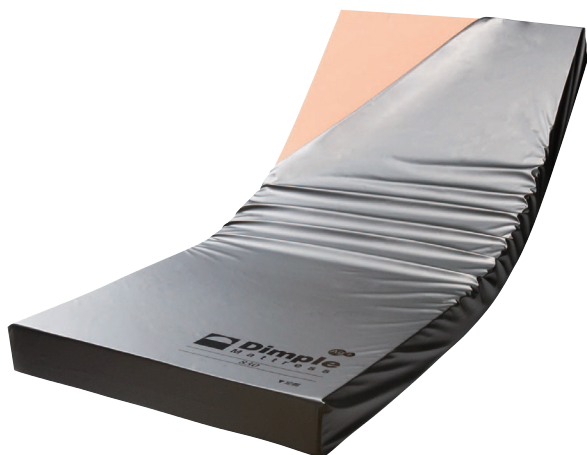

圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5422-1 | 00206-000070 |

サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm

材質/カバー：(上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス
マット：(1、2層目面) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム

| ご利用者 負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 | (3割) 1,200 円 | 月額レンタル料金 4,000 円 |
|------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------|
|------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------|

厚さ
12
cm 重さ
6.6
kg

被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8
測定器/ABW 社製 ERGO CLASSIC

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付: 171005 予防給付: 671005

ベッド・
ベッド
付属品

ブレイラハイブリッド・ケアマットレス91cm幅

グローバル産業

予防～軽度 静止型

柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、床ずれ防止マットレス。

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品


情報



やわらかめ しっかり

厚さ 8.0 cm 重さ 13.5 kg

被験者/身長約160cm、体重約53kg、BMI値約20.7
測定器/タカノ株式会社製FSA圧力分布測定装置

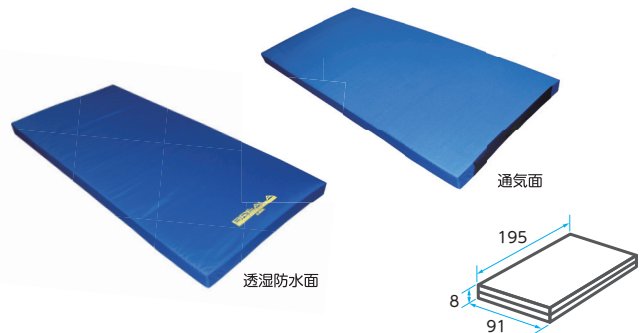

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5396-1 | 01149-000015 |


サイズ: 幅91×全長195×厚さ8cm 重さ: 13.5kg

●中材: 天然ラテックス ●カバー: 防水面: ナイロン100%、通気面: ポリエステル100%
ご利用者 (1割) 負担額 **500** 円 (2割) **1,000** 円 (3割) **1,500** 円 月額レンタル料金 **5,000** 円

アルファプラL 撥水・防水

タイカ

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、さらにアルファゲルを組み合わせることで、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。

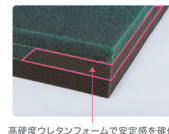

高硬度ウレタンフォームで安定感を確保

厚さ 10 cm 重さ 6.9~7.6 kg やわらかめ しっかり

予防～軽度 静止型

●熱の放散性能が30%以上向上。(撥水・防水カバータイプでの比較)

●3層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり。ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



マットレスが押し返すような感覚で、立ち上がりをサポート。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5570-1 | 00563-000103 |

サイズ: 幅91×全長195×厚さ10cm マット重さ: 7.6kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5571-1 | 00563-000101 |


サイズ: 幅83×全長195×厚さ10cm マット重さ: 6.9kg

材質: シリコーンゲル/ポリウレタンフォーム (撥水・防水) カバー: 表地/ポリエステル 裏地/ポリウレタン
ご利用者 (1割) 負担額 **500** 円 (2割) **1,000** 円 (3割) **1,500** 円 月額レンタル料金 **5,000** 円

アルファプラF 撥水・防水

タイカ

軽度～中度 静止型

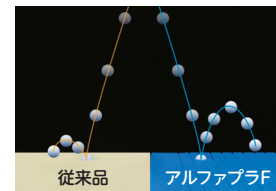

独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き上がりをサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5455-1 | 00563-000059 |

サイズ: 幅91×全長195×厚さ13cm

材質/マット: アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー: 表地/ポリエステル、裏地/ポリウレタン
ご利用者 (1割) 負担額 **500** 円 (2割) **1,000** 円 (3割) **1,500** 円 月額レンタル料金 **5,000** 円

厚さ 13 cm 重さ 9.5 kg やわらかめ しっかり

ベッド・
ベッド
付属品




床ずれ防止用具

ストレッチグライドマットレス

軽度～中度 静止型

床ずれ
防止用具

パラマウントベッド マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。身体の部位に応じた、ウレタンフォーム素材とカットリングの組み合わせにより、優れた体圧分散性能を発揮します。

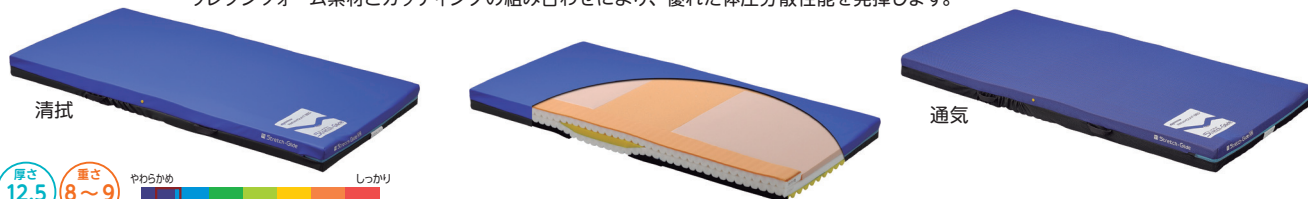

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| [清拭]91cm幅 レギュラー | 13-5489-1 | 00170-000720 |
| [清拭]91cm幅 ミニ | 13-5490-1 | 00170-000721 |

サイズ：幅91×全長191（ミニ180）×厚さ12.5cm 重さ：9kg（ミニ8.5kg）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| [清拭]83cm幅 レギュラー | 13-5491-1 | 00170-000722 |
| [清拭]83cm幅 ミニ | 13-5492-1 | 00170-000723 |

サイズ：幅83×全長191（ミニ180）×厚さ12.5cm 重さ：8.5kg（ミニ8.0kg）

材質／カバー：ポリエステル、ポリウレタン、マット：ウレタンフォーム・ポリエステル

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 1,500 円 | | 5,000 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| [通気]91cm幅 レギュラー | 13-5493-1 | 00170-000725 |
| [通気]91cm幅 ミニ | 13-5494-1 | 00170-000726 |

サイズ：幅91×全長191（ミニ180）×厚さ12.5cm 重さ：9kg（ミニ8kg）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| [通気]83cm幅 レギュラー | 13-5495-1 | 00170-000727 |
| [通気]83cm幅 ミニ | 13-5496-1 | 00170-000728 |

サイズ：幅83×全長191（ミニ180）×厚さ12.5cm 重さ：8kg

材質：ポリエステル・ウレタンフォーム

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 1,500 円 | | 5,000 円 |

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖


エバープラウドマットレス (ドライタイプ)

エクストラソフト面 軽度～中度 静止型

パラマウントベッド

ソフト面 予防～軽度 静止型

歩行器

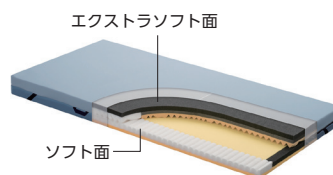

車椅子・
車椅子
付属品



画像は 91cm 幅レギュラー

体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート

スロープ

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5665-1 | 00170-000966 |

サイズ：幅91×全長191×厚さ13cm マット重さ：11kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ミニ | 13-5666-1 | 00170-000967 |

サイズ：幅91×全長180×厚さ13cm マット重さ：10.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5667-1 | 00170-000968 |

サイズ：幅83×全長191×厚さ13cm マット重さ：10kg

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) | 1,200 円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 1,800 円 | | 6,000 円 |

移動用
リフト・
つり具



介護保険
購入
対象品

ステージア

軽度～
リスク保有者 ハイブリッド

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策

●ステージアが備えている7つの特性

| | | | | | | |
|--------|------|-------|-----|-------|------|------|
| 体圧分散性能 | 除圧性能 | ずれ力対策 | 寝心地 | 座位安定性 | むれ対策 | ひえ対策 |
|--------|------|-------|-----|-------|------|------|

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全：心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)

(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5410-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ：11kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ショート | 13-5412-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ：10.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5409-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ：10.0kg


材質／カバー：ウレタン合皮、マット：<マイクロエアセル>ウレタンフィルム<フィッティング層・底着き防止層>高耐久ウレタンフォーム

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | 800 円 | (2割) | 1,600 円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 2,400 円 | | 8,000 円 |

販売品



情報

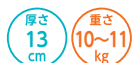

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付: 171005 予防給付: 671005

ベッド・
ベッド
付属品

オスカー

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



●自動体位変換機能



厚さ 17 cm
重さ 11.5~13.5 kg

軽度~
リスク保有者 ハイブリット

●オスカーが備えている8つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 おれ対策 ひえ対策 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全: 心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できる CPR ボタン / CPR ユニット)

(安心: リハビリモード / 背上げモード / 強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5466-1 | 00054-000137 |

サイズ: 幅 91 × 全長 193 × 厚さ 17cm マット重さ: 13.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5465-1 | 00054-000137 |

サイズ: 幅 83 × 全長 193 × 厚さ 17cm マット重さ: 12kg

材質/カバー: ウレタン合成、マット: ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム)
消費電力: 58W、1日約1.5~5.5円

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 900 円 | 1,800 円 | 2,700 円 | 9,000 円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

エアマスターネクス Rセット

ケーブル



厚さ 12 cm
重さ 8.1~9.1 kg

体重40~60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる“かんたんモード”を搭載。自動ヘッドアップ対応機能。

軽度~
リスク保有者 圧切替型

材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) 消費電力: 10w、1日約4.8円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5516-1 | 00206-000083 |

サイズ: 幅90×全長191×厚さ12cm マット重さ: 9.1kg

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 700 円 | 1,400 円 | 2,100 円 | 7,000 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 ショート | 13-5518-1 | 00206-000085 |

サイズ: 幅90×全長180×厚さ12cm マット重さ: 8.5kg

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 700 円 | 1,400 円 | 2,100 円 | 7,000 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 84cm幅 レギュラー | 13-5517-1 | 00206-000082 |

サイズ: 幅84×全長191×厚さ12cm マット重さ: 8.6kg

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 700 円 | 1,400 円 | 2,100 円 | 7,000 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 84cm幅 ショート | 13-5520-1 | 00206-000084 |

サイズ: 幅84×全長180×厚さ12cm マット重さ: 8.1kg

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 700 円 | 1,400 円 | 2,100 円 | 7,000 円 |

歩行
補助杖

歩行器


車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ビッグセル インフィニティ/インフィニティプラス

ケーブル

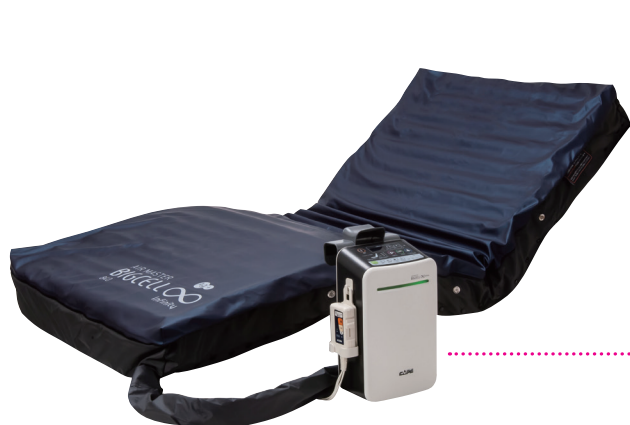

ビッグセルインフィニティプラス

厚さ 17 cm
重さ 8.6~9.6 kg

中重~
リスク保有者 圧切替型



拘縮対応モード
自動ヘッドアップ対応機能

エアポンプ表示

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自動感知。停電対策機能でマット内圧を14日間保持。

インフィニティプラス専用パッドがエアマットレス内部の冷えを防ぎます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5445-1 | 00206-000074 |

サイズ: 幅90×全長191×厚さ17cm マット重さ: 8.6kg 消費電力: 12W、1日約6.9円

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | 10,000 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| プラス90cm幅 レギュラー | 13-5471-1 | 00206-000076 |

サイズ: 幅90×全長191×厚さ17(足元のみ18) cm マット重さ: 9.6kg

消費電力: 40W、1日約27.4円(専用パッド部含)

材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 1,100 円 | 2,200 円 | 3,300 円 | 11,000 円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報